



Veillez lire les instructions avant usage.

—

Kiwi Shield n'est pas un fournisseur de produits de protection médicale officiels. Cette initiative n'est soutenue par aucun ministère de la santé ni aucune autre administration gouvernementale. Par conséquent, l'usage de ce produit sera à votre propre risque.

Kiwi Shield est une visière de protection en matière plastique PET découpée au Laser, à utiliser comme protection additionnelle et non comme remplacement. La découpe au Laser peut laisser les bords sales sur le film de protection, cela ne devant pas subsister une fois le film enlevé. Dans le cas contraire ne pas utiliser la visière.


Cette initiative a été prise à la demande de médecins ou autres professionnels de santé de notre région.


Nous recommandons de suivre les étapes suivantes :

Désinfecter la visière reçue


Enlever le film protecteur des deux faces des pièces découpées au Laser. Ceci est important pour éviter d'endommager la visière pendant l'assemblage.

Désinfecter de nouveau après l'assemblage.

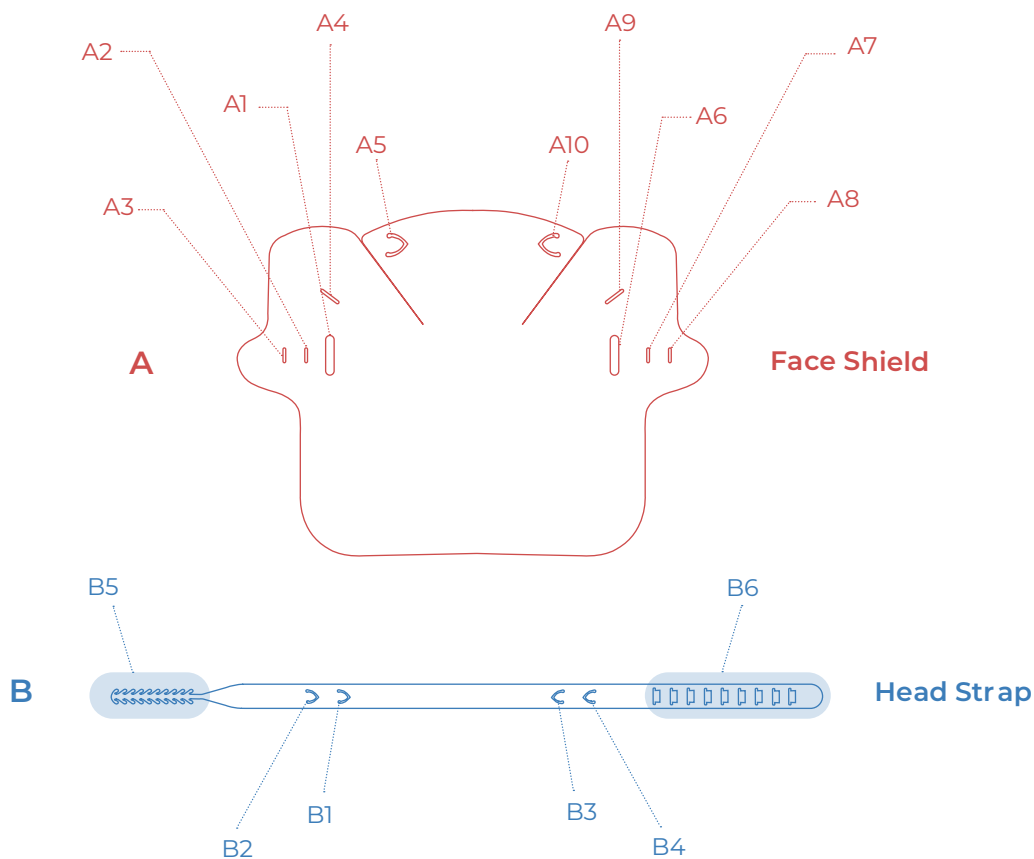


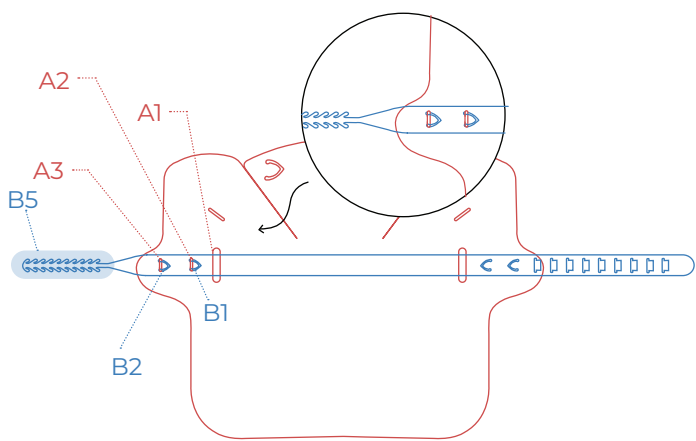


1 Glisser **B5** à travers **A1**, fixer **B2** dans **A3** et **B1** dans **A2**. Tirer pour bien insérer les languettes.

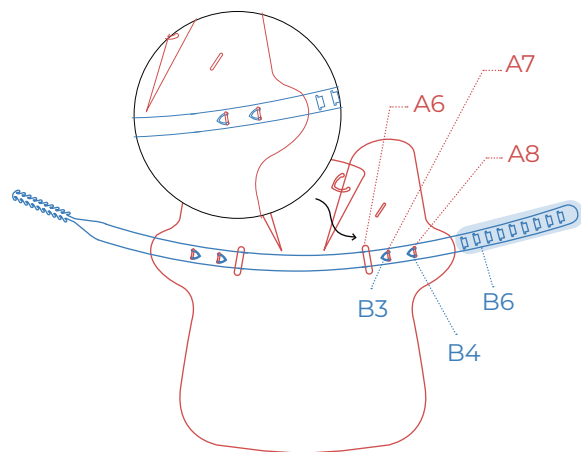


2 Glisser **B6** à travers **A6**, fixer **B3** dans **A7** et **B4** dans **A8**. Tirer pour bien insérer les languettes.

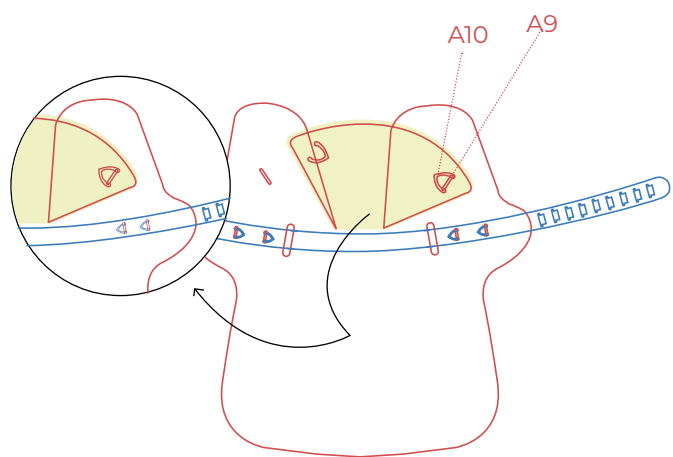


3 Courber **A10** pour fixer dans **A9**. Assurez-vous que le battant intérieur (marqué en jaune) soit positionné par-dessus les battants extérieurs.

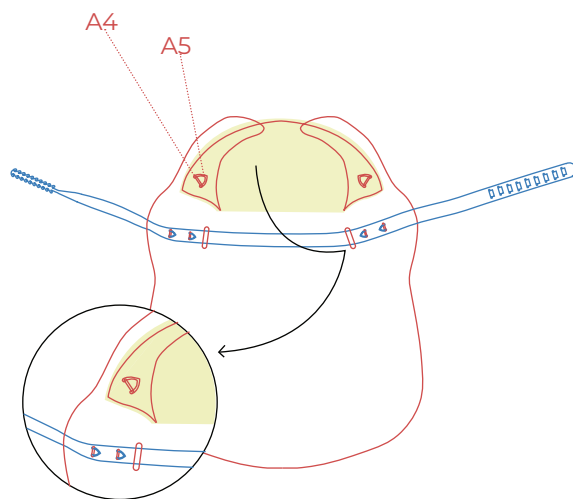

4 Courber **A5** pour fixer dans **A4**. Assurez-vous que le battant intérieur (marqué en jaune) soit positionné par-dessus les battants extérieurs.

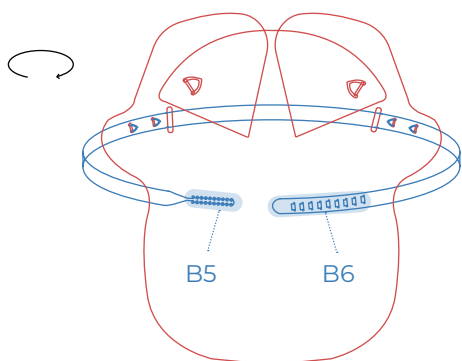

5 Retourner la visière de sorte que **B5** et **B6** se trouvent en face de vous.

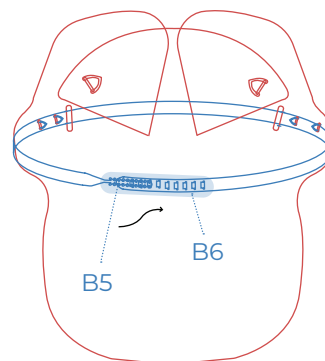

6 Glisser **B5** à travers une fente de **B6**. La taille du serre-tête dépendra de la fente choisie. Pour l'ajustement final tirer sur les crans ou au besoin choisissez une autre fente.