



## Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Kiwi Shield non è un fornitore di prodotti di protezione medicali ufficiale. Questa iniziativa non ha il sostegno ufficiale del ministero della salute o di altre amministrazioni di alcun governo. Quindi vi preghiamo di capire che l'uso di questo prodotto è a vostro rischio e pericolo.

Kiwi Shield è una visiera di protezione in materiale plastico PET tagliato con il Laser, da usare come protezione aggiuntiva e non di sostituzione. A causa del taglio laser, i bordi possono essere irregolari sulla pellicola di protezione, ma una volta rimossa, la visiera dovrebbe rimanere pulita. In caso contrario non è utilizzabile.


Questa iniziativa è stata presa sulla domanda di medici e professionisti nel campo della salute della nostra regione.


Raccomandiamo di procedere come segue:

Disinfettare la visiera ricevuta


Ritirare la pellicola di protezione in entrambi i lati dei pezzi tagliati al Laser. Questo è importante per evitare di danneggiare la visiera durante l'assemblaggio.

Disinfettare di nuovo dopo l'assemblaggio.

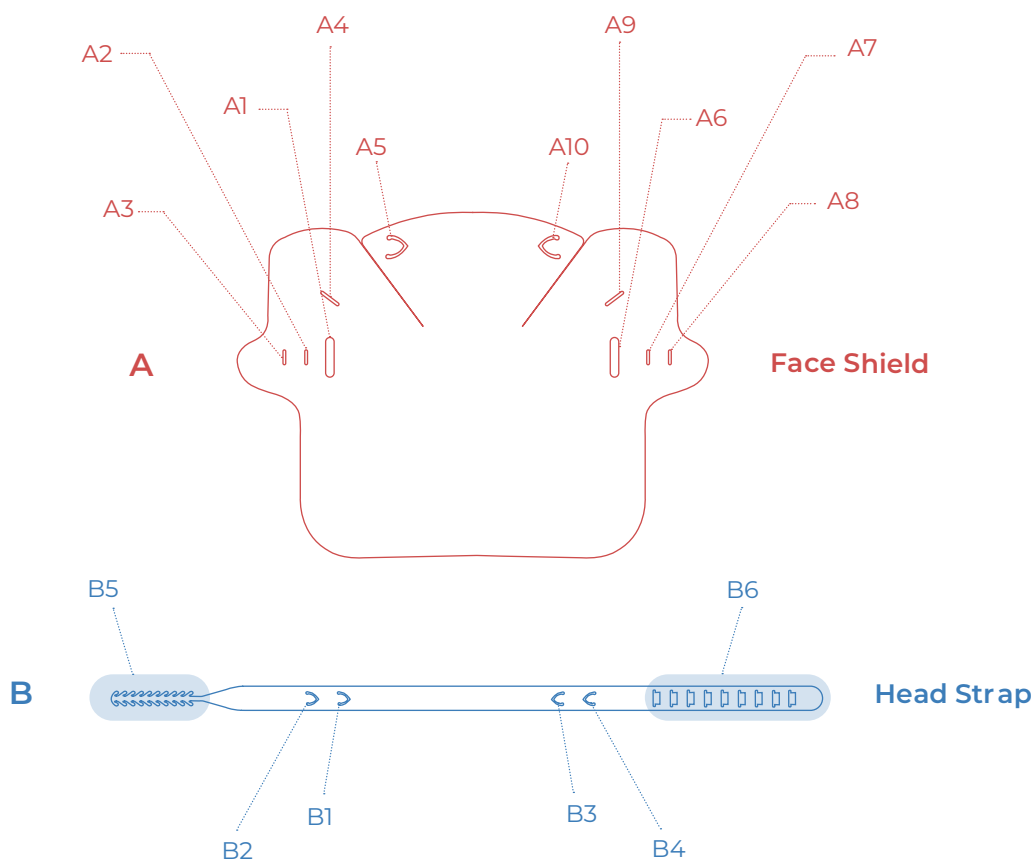


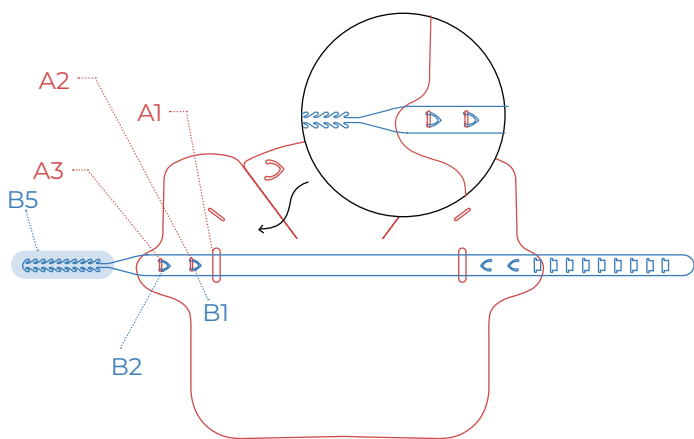


- 1** Introdurre **B5** dentro **A1**, fissare **B2** in **A3** e **B1** in **A2**. Tirare per inserire bene le linguette.

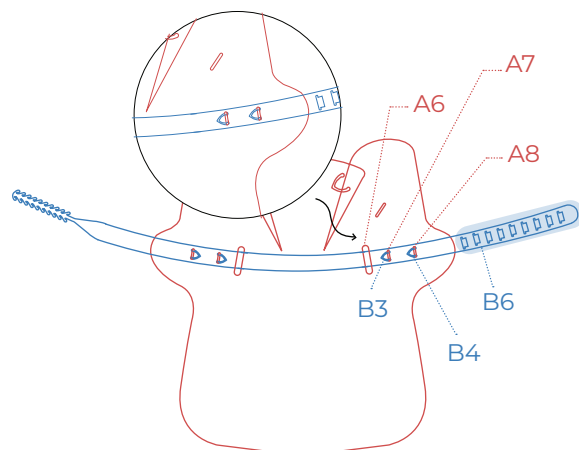


- 2** Introdurre **B6** dentro **A6**, fissare **B3** in **A7** e **B4** in **A8**. Tirare per inserire bene le linguette.

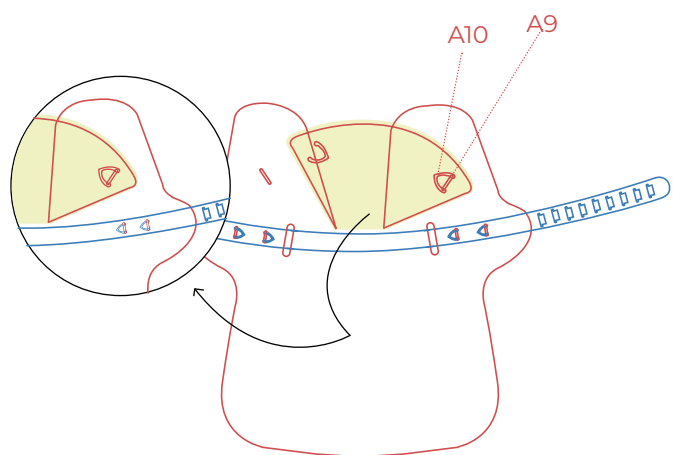


- 3** Curvare **A10** per fissare dentro **A9**. Assicurarsi che la parte interna (segnata in giallo) sia posizionata sopra le parti esterne.

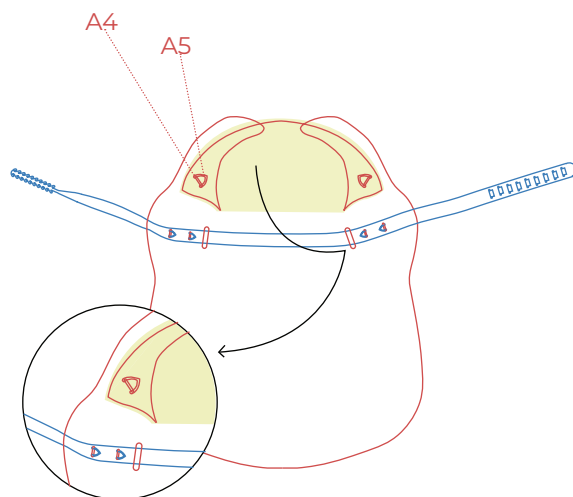

- 4** Curvare **A5** per fissare dentro **A4**. Assicurarsi che la parte interna (segnata in giallo) sia posizionata sopra le parti esterne.

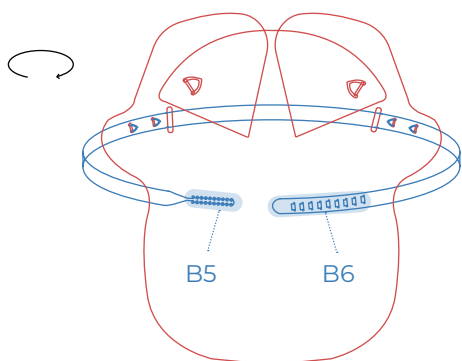

- 5** Girare la visiera in modo che **B5** e **B6** si trovino di fronte a voi.

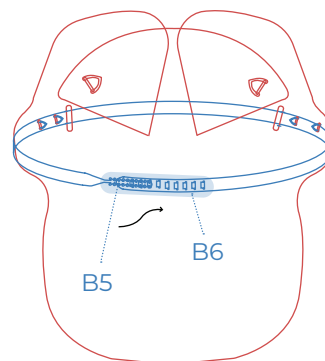

- 6** Introdurre **B5** dentro una fessura di **B6**. La taglia della fascia dipenderà della fessura scelta. La posizione di dentini e fessure permetteranno di regolare la taglia.